

Die häufigsten in der Praxis vorkommenden Hautveränderungen, die mit Cryosuccess erfolgreich behandelt werden können.

Kälte-Chirurgie bei einer Temperatur von -89°C

Auszug aus der Indikationstabelle

Indikationen	empfohlene Therapiezeiten (Sekunden)
Alterspigmentierung	1-2
Lentigines seniles	2-3
Lentigines maligna	4-5
Akneknoten	4-6
juvenile Warzen	3-4
Aktinische Keratosen	5-7
Solare Keratosen	4-5
Keratoma senile	7-8
Basaliom	8-9
SSM	3-4
Naevus pigmentosus	8
Naevuszellnaevus	8
Naevus flammeus	6
Naevofibrom	8-10
weiche Fibrome	4-5
cavernöse Angiome	4-6
kapillar-kavernöses Angiom	4-5
Hämangiolympfangiom	6-8
Keloide	4-6
Verrucae vulgares	8-10
Plantarwarzen	15-20
Verrucae seborrhoicae	6-8
Mollusca contagiosum	3-5
Erythematodes chronicus	3-5
Granuloma anulare	5-6
Prurigo nodularis	4-6
Lichen ruber papelu	4-6
Kondylome	8-12
Spinaliome	8-10
Sarkome	8-10
Lidbasaliome	6-10
Lidtumore	6-8
Lippenkarzinom	2-5

Die vorliegenden Anwendungszeiten gelten lediglich als Empfehlung.

